

> Kết quả điều



>> Thông số kỹ thuật

Công nghệ	Needle RF Needle iontophoresis
Kim	Gold coating Non-Insulated [0.5mm) 0.0 - 4.0mm [0.2mm /Step]
Chế độ	Auto, Manual
Motor	Stepping motor
Tần số	1MHz, Bi-polar
Màn hình	15" LCD Touch panel



Distributor
VINHY MEDICAL AESTHETIC: 119 ĐIỆN BIÊN PHỦ, PHƯỜNG TÂN ĐỊNH, TP.HCM
HOTLINE: 0962977038 info@vinhy.com, <https://vinhy.com/>



Manufacturer
307-308, SSang Yong IT Twintower A, 442-17, Sangdaewon1-Dong, Jungwon-Ku, Seongnam-Si, Gyeonggi-Do, KOREA

Tel +82-31-608-5241 Fax +82-31-608-5245 CS 1644-6842 E. einsmed@naver.com
www.einsmed.com



Marvelous Anti-aging technology



EINXEL PLUS

dual actions

Micro fractional Needle RF



XU HƯỚNG CÔNG NGHỆ TRẺ HÓA DA



EinXel Plus is..


EinXel Plus là thiết bị sử dụng các đầu kim có độ dài khác nhau và ứng dụng trực tiếp năng lượng RF đã được chứng nhận, từ đó điều trị các vấn đề về da như nếp nhăn, độ đàn hồi của da, elastin bằng cách nghiên cứu loại năng lượng RF lưỡng cực (1 MHz) và kích thích các tế bào nguyên bào sợi ở lớp hạ bì.

Để truyền năng lượng RF hiệu quả hơn đến lớp hạ bì, EinXel Plus phân tách chế độ năng lượng RF thành PULSE/CW, từ đó lựa chọn Chế độ Xung cho tổn thương cần làm nóng bằng nhiệt không xâm lấn và nghiên cứu năng lượng RF rút ngắn Thời gian không Nhiệt TRT I.

Theo cách này, EinXel Plus được thiết kế để truyền năng lượng làm nóng lý tưởng đến lớp hạ bì trong phạm vi mà hiện tượng đông tụ hoặc bốc hơi không xảy ra. Ngược lại, nó được thiết kế để áp dụng chế độ CW cho tổn thương cần điều trị mạnh hơn, nhằm cho phép điều trị chuyên biệt.

Ngoài ra, các vùng khác ngoài đầu kim (1 mm) được phủ một lớp vàng để giảm thiểu tác dụng phụ lên lớp biểu bì. Trong khi đó, lớp phủ vàng của thiết bị giúp giảm thiểu dị ứng da.

EinXel Plus hoạt động thế nào?

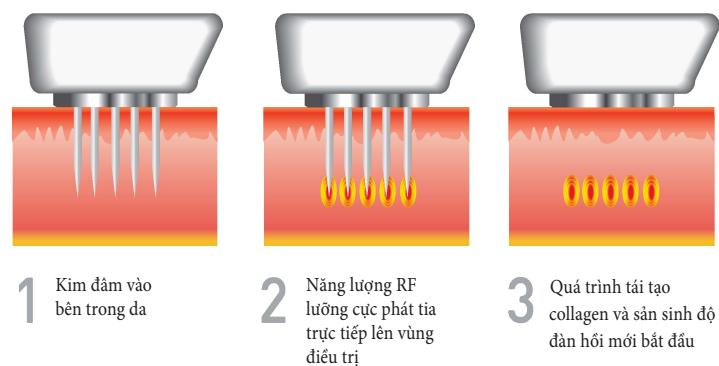


Chỉ định

Giảm nếp nhăn,
thu nhỏ lỗ chân
lông, vết rạn da

Săn chắc da
Sẹo mụn

Trẻ hóa da
sẹo phẫu thuật

So sánh với các công nghệ khác

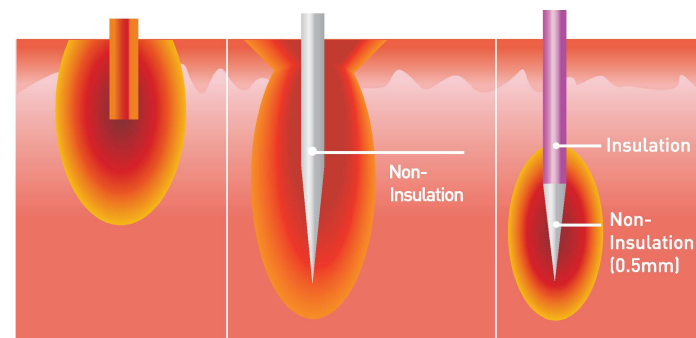

Fractional Co2 laser

Kim không phủ

EinXel Plus
Kim

EINXEL PLUS



Truyền nhiệt có chọn lọc

0.2mm-4.0mm [0.2mm step]

Điều trị lớp biểu bì và lớp bì bằng cách kiểm soát độ sâu của kim theo đơn vị 0,2mm

01

04

Phủ kim

Bảo vệ lớp biểu bì khỏi

Tác dụng phụ

Chế độ điều trị kép

CW/PULSE

CW (bóc tách) PULSE (không bóc tách)

02

EinXel Plus Benefits

05

Kim phủ vàng

Kim có độ bền cao và khả năng tương thích sinh học cao nhờ phủ vàng. Bệnh nhân dị ứng kim loại cũng có thể sử dụng mà không lo bị viêm da tiếp xúc.

Tác động kép

Needle RF Điều trị nhiệt

Needle Iontophoresis

đưa thuốc vào da

(EFG, Vit C, Placenta etc.)


03

06

Stepping Motor

Khác với loại solenoid hiện có, kim đâm vào da một cách nhẹ nhàng, không gây sốc và ít gây chảy máu, đau sau phẫu thuật.

Needle Iontophoresis Mode

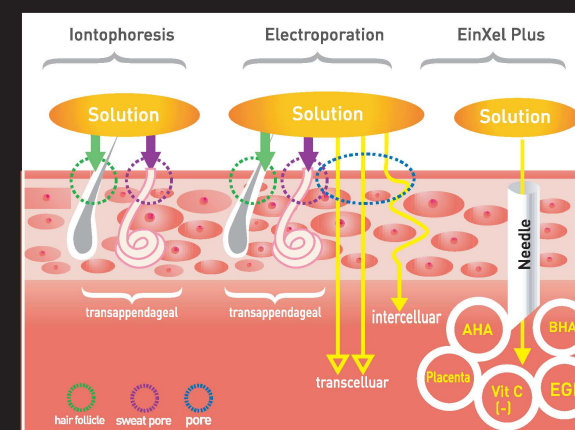

Positive - AHA, BHA

Negative - Vit C

Polarity - Placenta, EGF, etc..

EinXel Plus Insulation Needle Meat Test

